

IMPLANTES DENTALES

GUÍA PARA PACIENTES



eckermann
DENTAL IMPLANT SYSTEM

Innovación | Fabricación | Flujo Digital | CAD-CAM
Atención al Cliente | Formación

¿Qué son los implantes dentales?

La vida deja huellas en nuestros dientes. Las enfermedades o los accidentes pueden provocar pérdidas dentarias. La ausencia de dientes no sólo tiene consecuencias estéticas, sino también funcionales y nos limita en muchos aspectos.

Los implantes dentales son unos pequeños tornillos de titanio que se colocan en el hueso mandibular o maxilar, constituyendo la raíz artificial del diente.


Sobre estos tornillos, se pueden efectuar tanto restauraciones de dientes individuales, como prótesis parciales o totales y funcionan exactamente igual que los dientes naturales.

Desde hace más de 40 años, los implantes dentales son la solución para volver a masticar con total comodidad, sonreír y hablar con la misma seguridad y claridad que con sus propios dientes, proporcionándole **MEJOR CALIDAD DE VIDA**.

SOLUCIÓN EFICAZ Y DURADERA

Las tasas de éxito de los implantes dentales a día de hoy es superior al 98 o/o de los casos. El titanio es un material bio-compatible aceptado por el organismo humano como si fuera un tejido propio.

Con un mantenimiento e higiene adecuado, la vida media de un implante puede superar los 30 años.

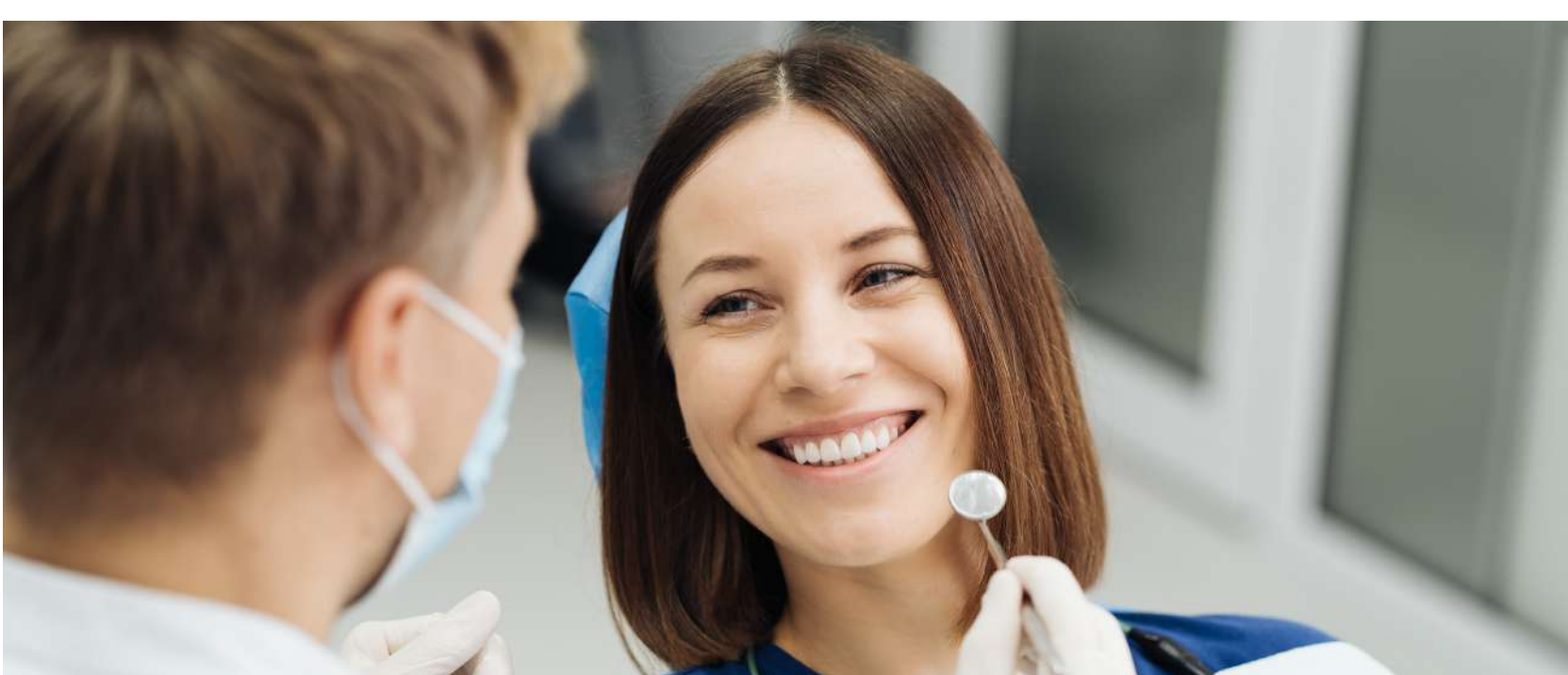

¿PUEDO PONERME YO IMPLANTES DENTALES?

Cualquier persona adulta es candidata al tratamiento con implantes dentales.

Pocas son las contraindicaciones, aunque existen algunas condiciones especiales en las que es aconsejable contraindicar o postponer el tratamiento con implantes, tales como la diabetes no controlada, cualquier patología o enfermedad que pueda alterar los procesos de cicatrización, el alcoholismo, el tratamiento con antidepresivos o el tabaquismo.

En cualquier caso, su odontólogo de confianza debe determinar si Ud. está o no en condiciones de ser tratado con implantes dentales.



¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES DENTALES?

En primer lugar, su odontólogo realizará un examen exhaustivo de su salud oral, la anatomía y densidad de su hueso maxilar, para establecer un plan de tratamiento adecuado.

El paso siguiente es la cirugía, momento en que se insertan los implantes dentales en el hueso, normalmente con anestesia local y bajo unas estrictas condiciones de asepsia y esterilidad. El post-operatorio es indoloro y de forma preventiva, se administran antibióticos y antiinflamatorios.

A partir de las 48 horas, el paciente puede hacer vida normal.

Actualmente existen técnicas quirúrgicas para la colocación del diente de forma inmediata, regeneración de hueso, etc .. Su dentista le informará de las opciones disponibles para Ud.

Transcurridos de 3 a 6 meses, tiempo en el que el implante se integrará firmemente en el hueso, comenzará la **etapa protésica**: toma de impresiones, moldes y pruebas, hasta llegar a la colocación de la prótesis terminada, en un plazo variable según cada caso.

Además, las nuevas tecnologías **3D y CAD CAM** han desarrollado procesos que permiten el diagnóstico, colocación de implantes y fabricación de la prótesis con total precisión.



¿Qué Mantenimiento necesitan los implantes dentales?

Durante el período de osteointegración del implante asegúrese de realizar una correcta higiene bucal, no mastique alimentos duros, evite esfuerzos físicos fumar y consumir alcohol, ya que dificulta el proceso de cicatrización.

Posteriormente, Ud. puede hacer vida normal, pero no olvide realizar una higiene bucal adecuada para evitar la formación de placa bacteriana que pueda poner en riesgo la vida de su implante.

Acuda a los controles periódicos posteriores programados por su dentista.

Un correcto mantenimiento ayudará al éxito del tratamiento y a la permanencia en el tiempo de las ventajas de esta valiosa inversión en su salud.

¿Porqué elegir implantes dentales Eckermann?

Los implantes Eckermann se fabrican cumpliendo con la normativa europea más exigente UNE EN ISO 13485 y UNE EN ISO 9001.

Eckermann es una empresa con más de 20 años de experiencia en la producción de implantes dentales con tecnología propia 100% española.

Cuenta con un proyecto de investigación basado en el contacto con los profesionales del sector y una factoría que dotada con la más vanguardista tecnología en micromecánica, todo ello para proporcionar tanto a los profesionales como a los pacientes las soluciones más avanzadas en la implantología dental.