


**EASY
Link**
Evolution

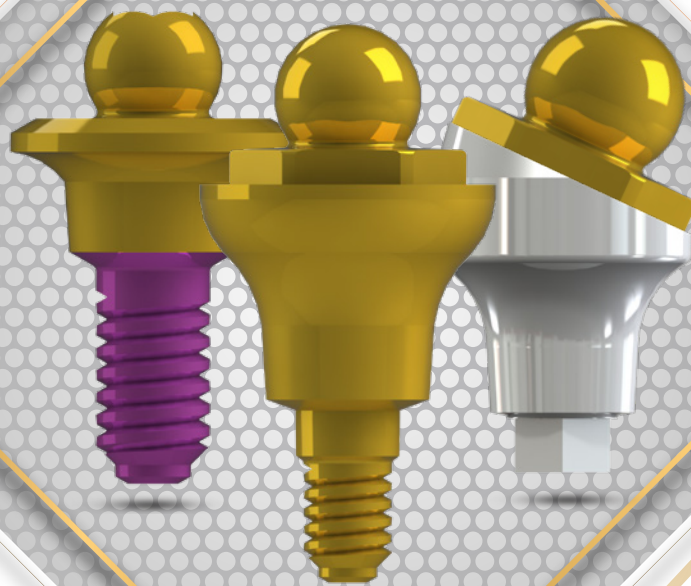

EASY LINK
LA SOLUCIÓN PARA TODO

Patente de invención N°: EP3034032

LA SOLUCIÓN EASY LINK PARA LA PRÓTESIS DENTAL

Sin tornillos y sin cemento. Sin complicaciones.

EASY LINK es un sistema patentado por Eckermann de prótesis fija y reversible que no necesita ni de chimeneas ni de cemento. De muy fácil aplicación y que reúne todas las virtudes de las prótesis atornilladas y cementadas.


Con el sistema EASY LINK se pueden realizar prótesis dentales tanto con los procedimientos tradicionales como con las nuevas tecnologías CAD-CAM. Abriéndonos un amplio abanico de posibilidades para obtener prótesis de todo tipo utilizando materiales de última generación.

EASY LINK simplifica la rehabilitación protésica completa dotando de máxima estética los resultados, eliminando tornillos, cemento, chimeneas y riesgos. EASY LINK permite **ahorrar en tiempo de consulta** (sillón) dándole tanto al clínico como al paciente resultados óptimos en tiempo record.

EASY LINK recomendado para cualquier tipo de resolución protésica tanto fija como removable, exceptuando la prótesis unitaria.



Así es un pilar EASY LINK

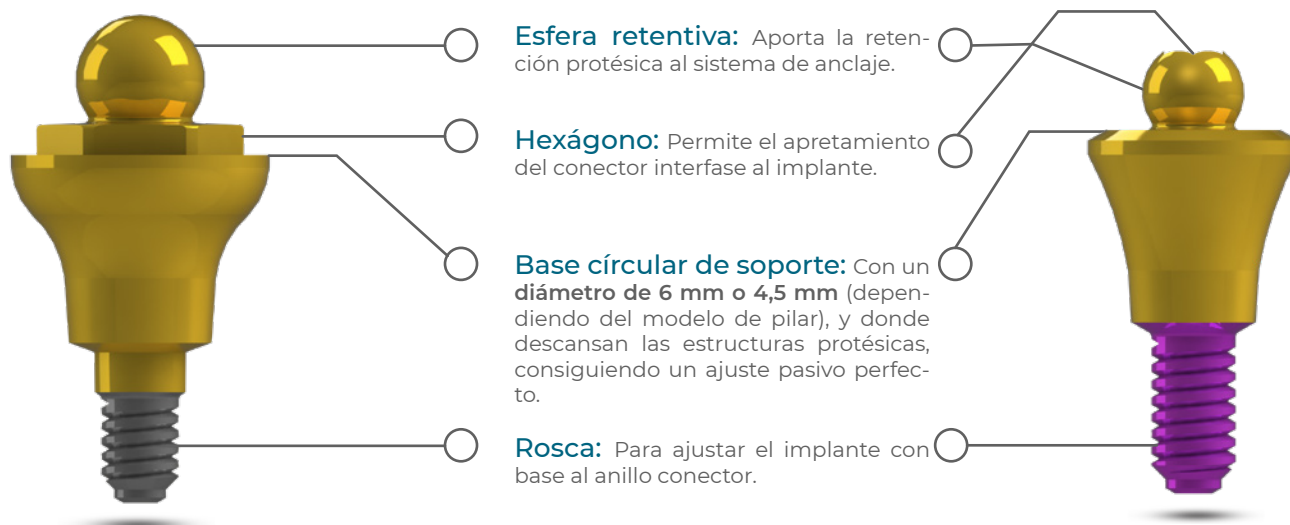

Titanio grado 5 (Ti6Al4V) nitrurado
Patente de invención N^º: EP3034032





Simple, eficaz, estético y robusto.

Trabajar con sus componentes es sorprendentemente sencillo y rápido. Permite trabajar con restauraciones de arcada completas fijas sin comprometer su resistencia ni su estética. Además, este sistema de anclaje es higiénico y reversible, pero evitando las chimeneas de las típicas prótesis atornilladas.

Los pilares EASY LINK son además respetuosos con el espacio biológico del paciente. Pues una vez colocados no es necesario removerlos o quitarlos sin romper la unión de los tejidos blandos a la superficie del pilar.



Albergue fresado




Casquillo cementado


Retención.

Gracias a su exclusivo sistema de anclaje y retención, no existe el problema de aflojamiento de los tornillos protésicos al implante o de las molestias ocasionadas por los restos de cemento, ofreciendo una solución óptima, estética, funcional y cómoda para el paciente.

EASY LINK permite al clínico decidir que nivel de retención quiere aplicar a la prótesis mediante el uso de los distintos retenedores intercambiables (identificados por colores) hechos de materiales de última generación para aplicaciones odontológicas.

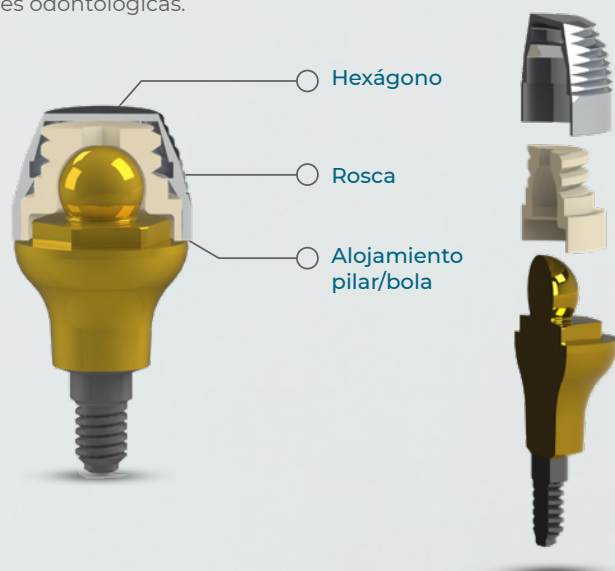


Retenedores intercambiables para prótesis fijas o removibles

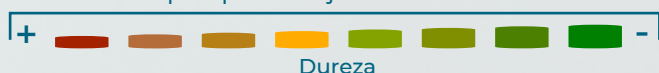

Soporte y distribución biomecánica ideal

El sistema de pilares EASY LINK permiten una compensación de angulaciones de hasta 20° entre sí, se consigue un eje de inserción de la prótesis con ajuste pasivo perfecto, y a su vez gracias a su plataforma, una distribución biomecánica de la carga oclusal al implante extraordinaria.

La plataforma del pilar EASY LINK, de 6mm o 4.5mm, permite un cierre ajustado entre el casquillo y la plataforma del pilar en los 360°, no habiendo desgaste de materiales pues el contacto lo hacen entre casquillo metálico y la plataforma del soporte del pilar.

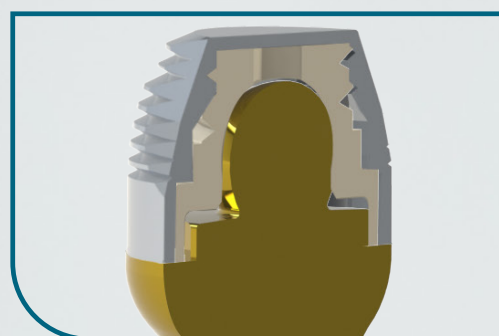

Una solución para todas las opciones.

Al tener distintos niveles de retención (hasta 4 niveles), el clínico puede ofrecer soluciones al paciente donde una única prótesis pueda convertirse de removible a fija de manera muy fácil y sencilla. Sin complicaciones ni pérdidas excesivas de tiempo.

La gran versatilidad de EASY LINK reside en que además de que se pueden compensar hasta 20° entre pilares rectos, también disponemos de pilares angulados (15° y 25°) para aquellos casos donde por la morfología del hueso del paciente, o por la técnica quirúrgica elegida, se requiere poner el implante con una mayor angulación.

Los pilares EASY LINK están disponibles en distintas alturas gingivales y para las diversas conexiones Eckermann.

EASY LINK dispone de todo un portfolio de aditamentos para poder realizar las prótesis tanto con técnicas tradicionales como con las técnicas de flujo digital.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> ① Pilar + implante ② Protector liso de Peek
6.0 → Peek natural (Biege)
4.5 → Rosa ③ Toma de impresión sobre el protector liso de peek | <p>Toma impresión
DE REFERENCIA</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> ① Pilar + implante. ② Transfer Easy Link. ③ Protector liso de peek ④ Réplica Easy Link para modelo analógico. ⑤ Casquillo metálico. | <p>Toma impresión directa
CON CUBETA CONVENCIONAL</p> |

Easy link evolution


"La revolución de la prótesis, sin tornillos, sin cemento."

Fijaciones regulables e intercambiables para cada una de las necesidades protésicas.

Reduce los tiempos de sillón y optimiza el tratamiento.


Patentado por Eckermann.

Easy link Estándar

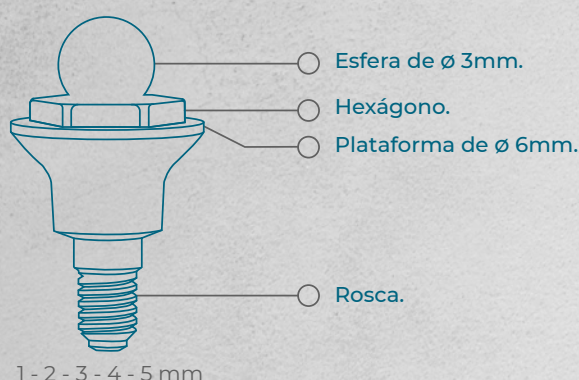


Easy link estrecho

Estructura de menos volumen y más estéticas

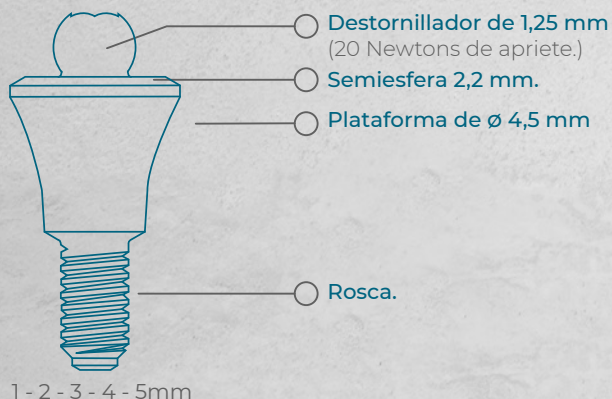


Pilares Easy Link Estrecho

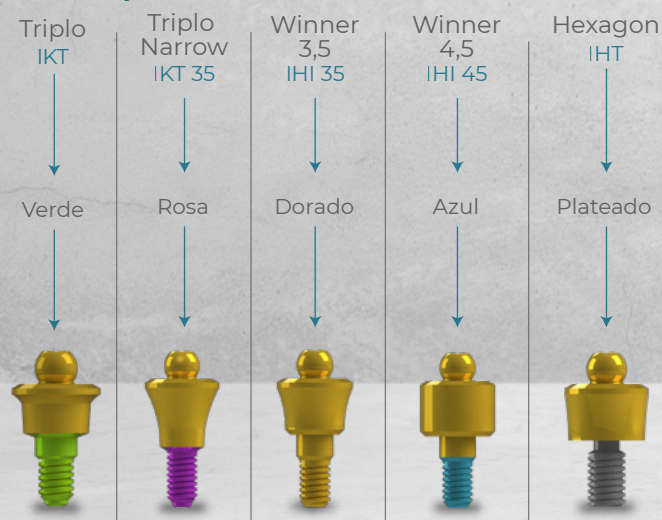

Easy link angulado


Dos angulaciones de 15° y 25°.
(Con tornillo oclusal de 1,8 métr. en Triplo y Winner y de 2 métr. en Hexagon).

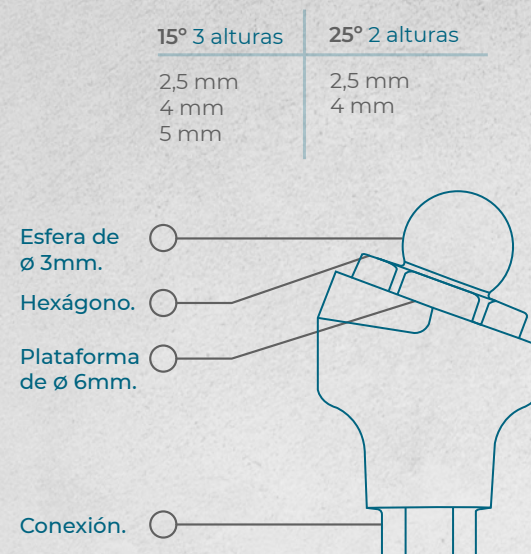

	15° 3 alturas		25° 2 alturas		
	2,5 mm 4 mm 5 mm		2,5 mm 4 mm		
	15°	2,5 mm 4 mm 5 mm	25°	2,5 mm 4 mm	Angulado a cara plana
	15°	2,5 mm 4 mm 5 mm	25°	2,5 mm 4 mm	Angulado a vértice
	15°	4 mm			Angulado a doce caras
	15°	4 mm			
	15°	2,5 mm 4 mm 5 mm	25°	2,5 mm 4 mm	Angulado a vértice







El tornillo se utiliza para fijar la plataforma angulada al implante.

Hay que utilizar la llave de inserción Easy Link (LEL T).




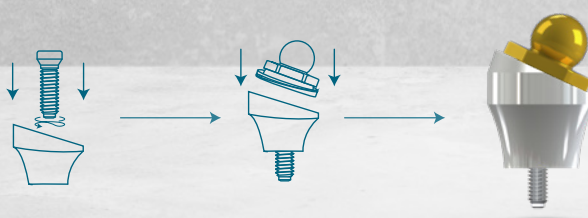


Pilares Easy Link

Plataforma ancha 6mm

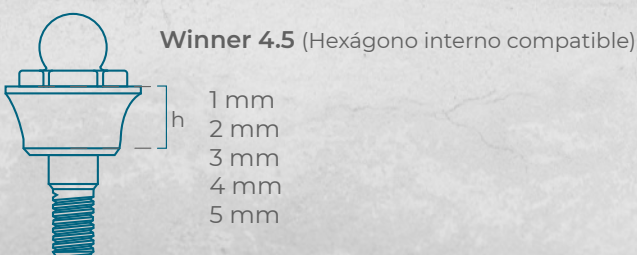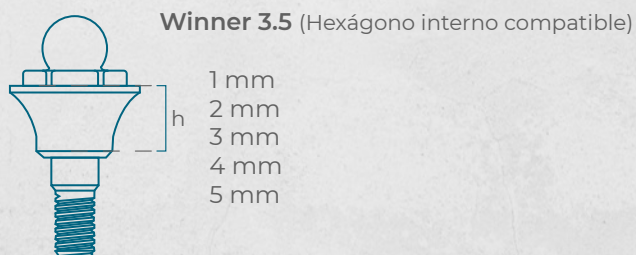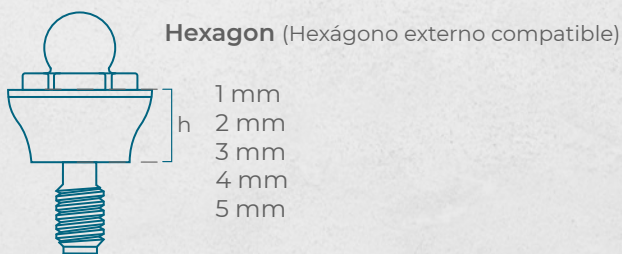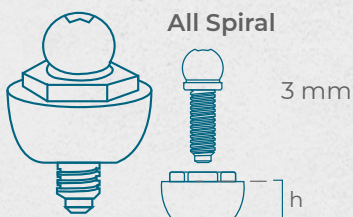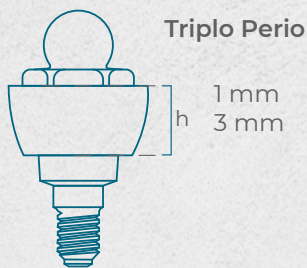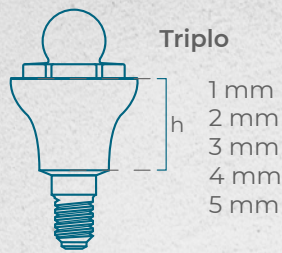

Plataforma estrecha 4,5mm

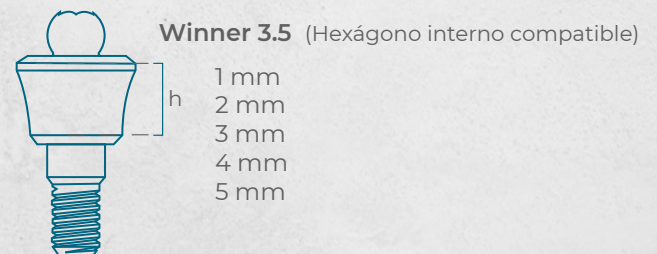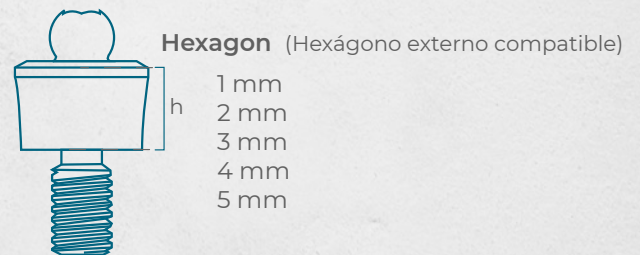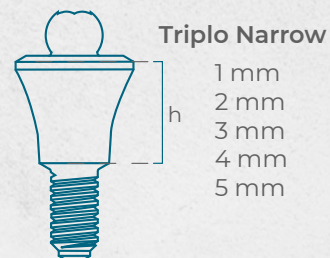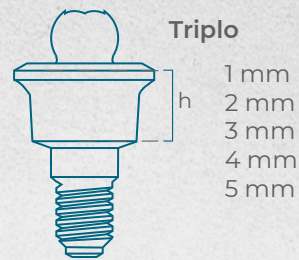


Easy Link de plataforma estrecha (4.5mm) Se recomienda:

- Aplicar siempre en zonas de compromiso estético.
- En casos múltiples combinarlos con los pilares Easy Link de 6mm de plataforma.
- Contraindicado para prótesis unitarias.
- Torque recomendado 22 Newtons de apriete.


Gama de Pilares Easy Link

PILARES Ø 6mm


Triplo

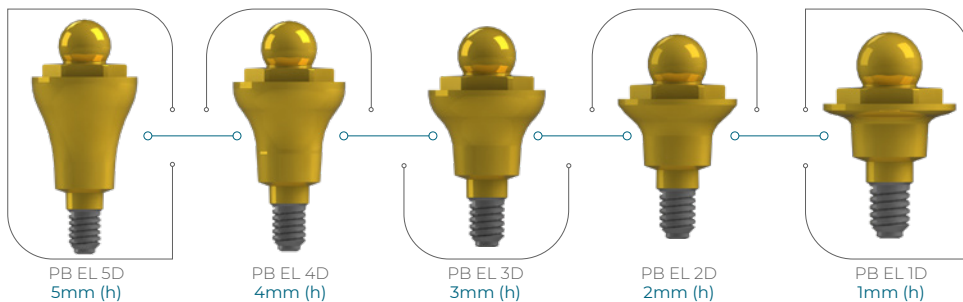


Triplo Perio

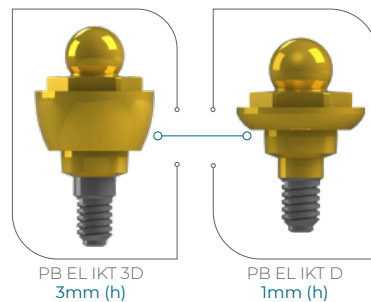


Hexagon 4.1

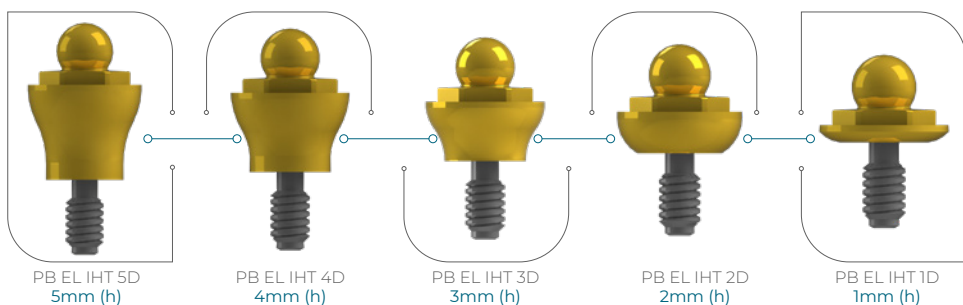


All Spiral

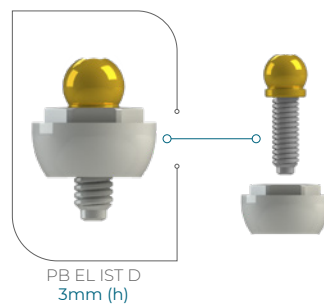

Winner 3.5

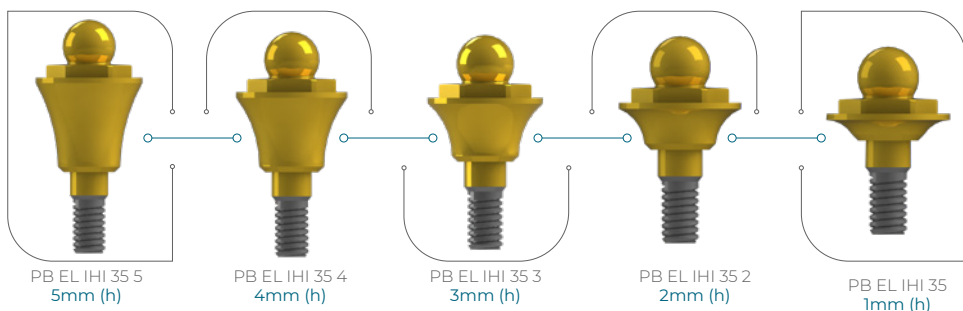


Winner 4.5

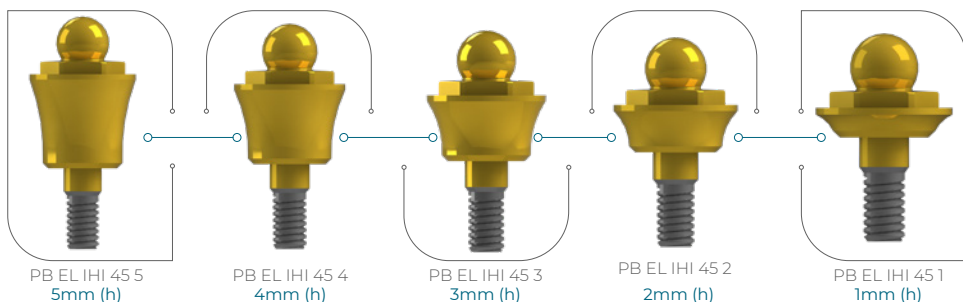


PILARES $\varnothing 4,5\text{mm}$


Triplo

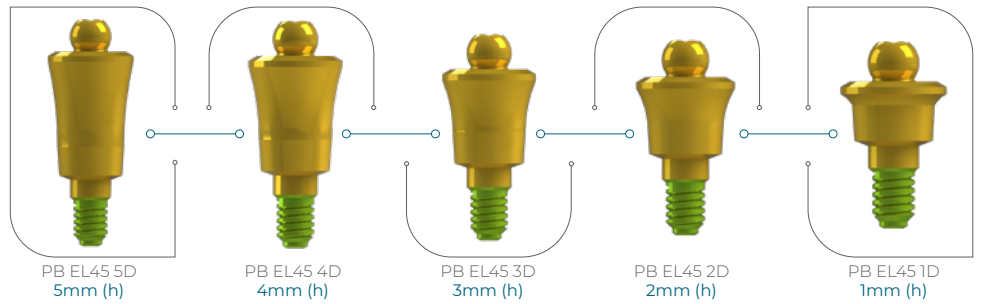


Triplo narrow

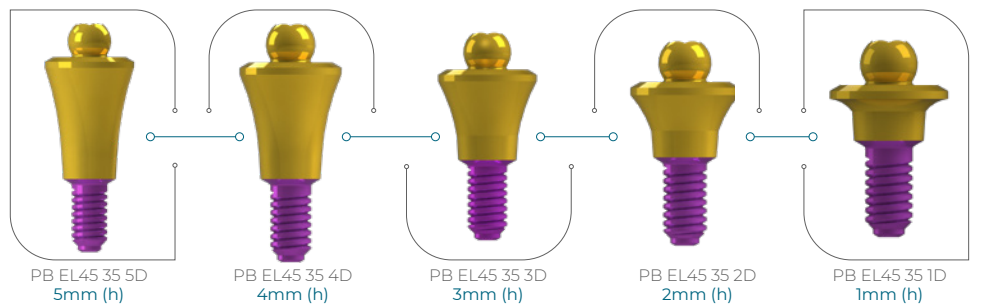

Hexagon

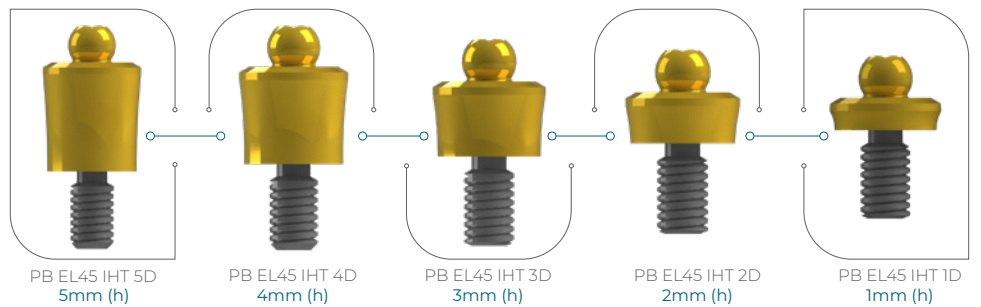


Winner 3.5

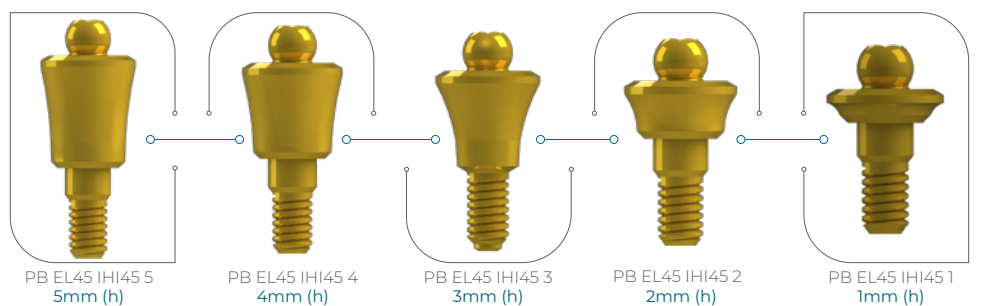


PILARES $\varnothing 4,5\text{mm}$

Winner 4.5

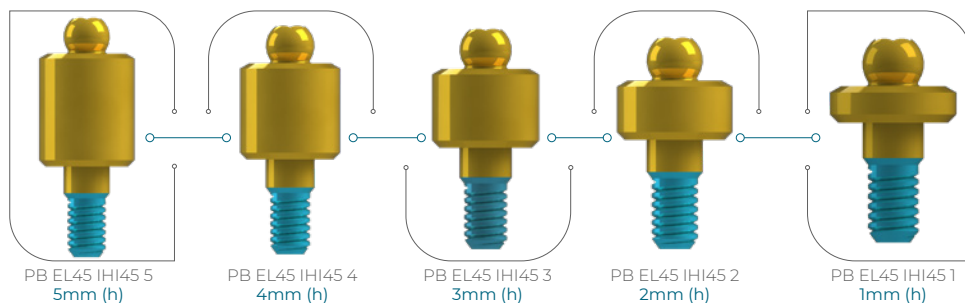


PILARES ANGULADOS


Triplo 15°

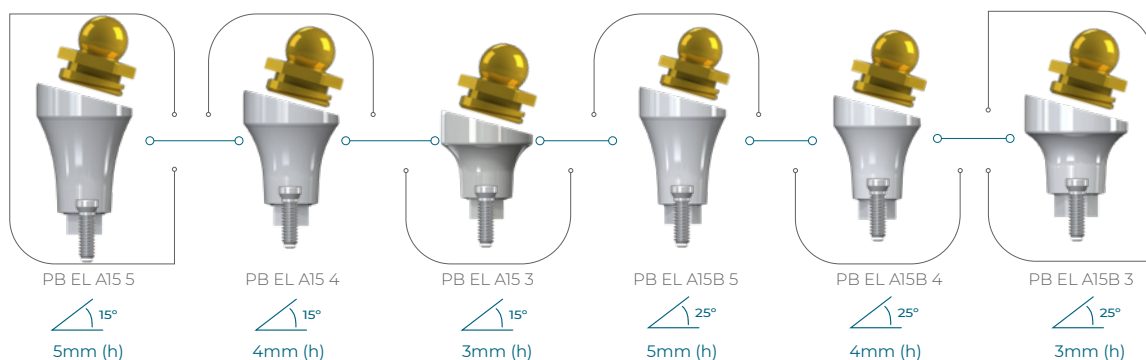

Triplo 25°

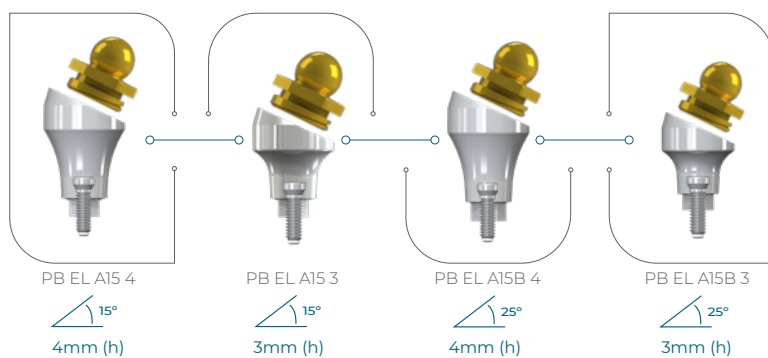

Hexagon 15°

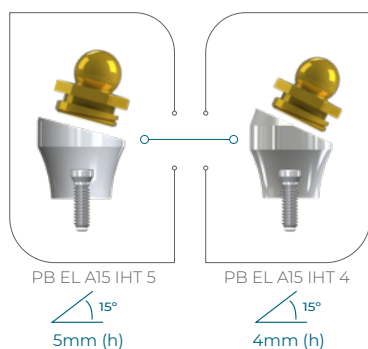


Hexagon 25°




PILARES ANGULADOS

Winner 15°

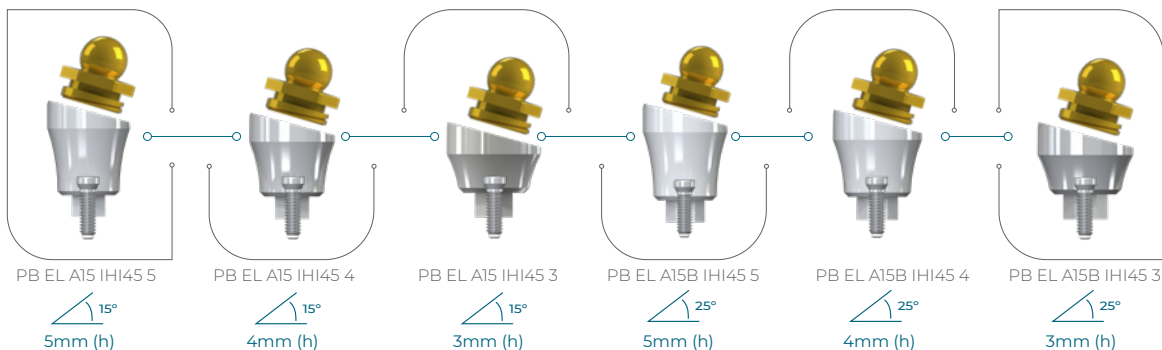

Winner 25°

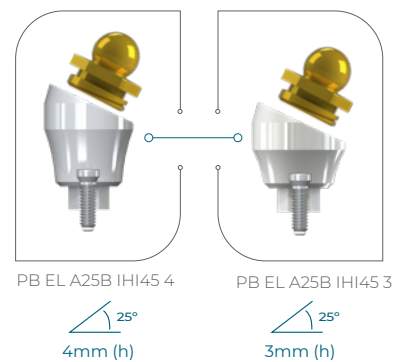

El protocolo Easy Link

Conformador estético
Easy Link



Laboratorio
ANALÓGICO



Tránsfer Easy Link



Réplica Easy Link
(Réplica de un implante)



Protector Liso de Peek
(Protector liso sobre pilar
Easy Link)

CAD-CAM




Laboratorio

Posicionador



Retenedores intercambiables

Toma de impresión
DIGITAL

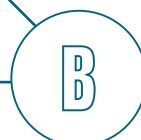

Scan Body




CEMENTADA
O REBASADA

Retenedores intercambiables



Casquillo metálico

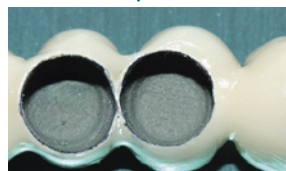



CARGA INMEDIATA


1 Provisional (previo a la cirugía)

Tener una prótesis provisional "lo más ahuecada posible" antes de la cirugía, con el fin de rebasar directamente en la boca.




2 Cirugía

Distancia entre centros de implantes de al menos 7mm.

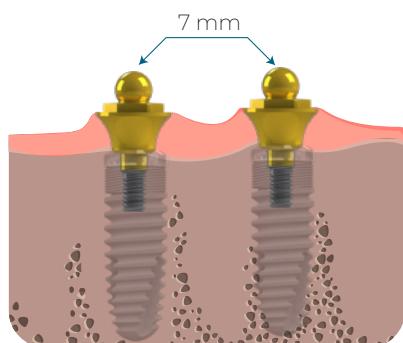


3 Pilares Easy Link (Altura gingival, varias alternativas)

Medir la mucosa para seleccionar la altura gingival alternativa (varias alternativas adecuada de cada pilar Easy Link para que la plataforma circular quede **paragingival** y atornillar al implante a 22 Newton.

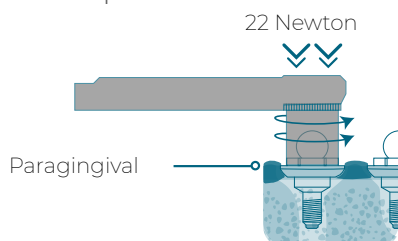

4 Protector liso de peek

Colocar el protector liso de peek haciendo presión sobre el pilar Easy link hasta escuchar el "click".

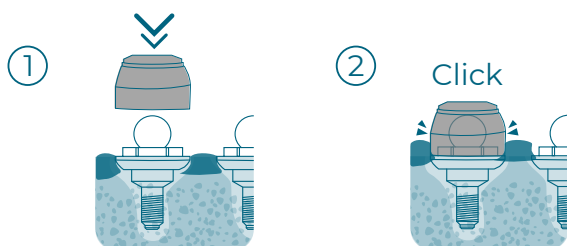

5 Rebase directo en la boca

Rebasar directamente en la boca con resina autopolimerizable introduciendo y extrayendo la prótesis varias veces para que no se pegue.



6 Diseño de prótesis higiénica

Con la pieza de mano se retira el paladar, los faldones y los excesos de material con el fin de obtener una prótesis provisional **fija** totalmente **higiénica**, diseñando, si se desea, un lugar cómodo para pasar el cable extractor (Sistema de rescate).


Cortesía de Lab Cesar Chust



7 Casquillos metálicos (rayados / caras planas)

Se retiran los moldeadores (haciendo fuerza de palanca lateral con un instrumento "pinza de mosquito o porta aguja") y se colocan los casquillos metálicos y retenedores intercambiables negros para ayudar a su futura extracción, por presión sobre los "los pilares Easy Link" (hasta escuchar el "click").

(Al usar casquillos rayados y con caras planas, aumenta la retención del cemento o resina y evitando la posibilidad de que gire el casquillo dentro).

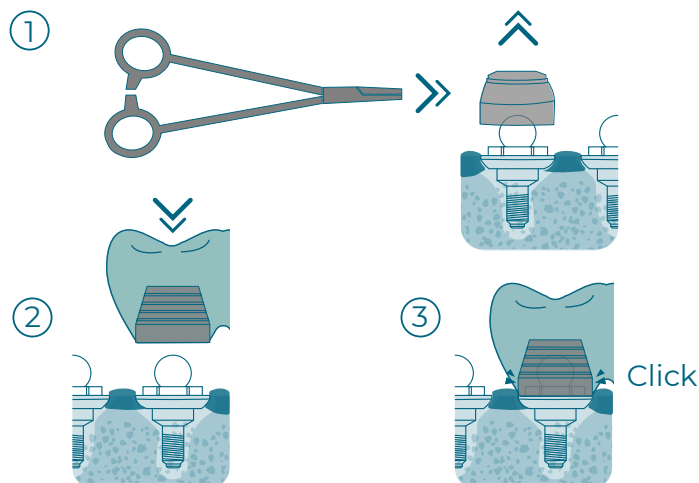




8 Cementación o rebasado de los casquillos a la prótesis

Se incorpora una pequeña cantidad de **cemento definitivo** (o resina) en los albergues que han quedado en la prótesis y se cementa sobre los casquillos metálicos (se aconseja retenedor ultraligero) que hemos colocado en la boca..

(Se trabaja como en la técnica cementada a dientes naturales).

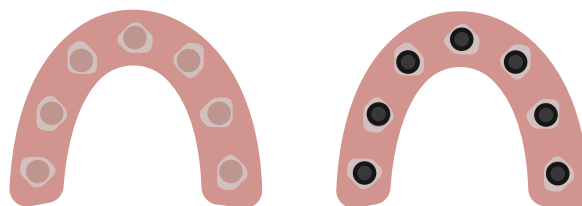


9 Retirada de la prótesis

Usar un levanta coronas (levanta puentes) con un cable de acero que abrace la prótesis por gingival o por el sistema de extracción que haya sido preparado previamente en la prótesis. Con un solo impulso, la prótesis se desengaja de las esferas y se extrae fácilmente. El paciente nunca podría quitárselas por tracción (siempre y cuando se coloquen los retenedores con mayor resistencia).



Otro método de rescate muy eficaz son los **extractores de estructuras**, insertándolo por la chimenea de la prótesis podemos extraerla evitando tirones y de una forma más cómoda y suave.

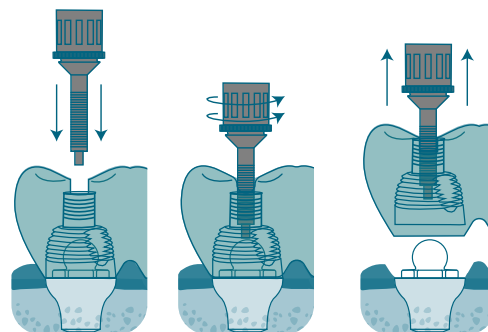


10 Consideraciones

Compensa hasta 40° de disparelismo (20° por implante)

Se aconseja que en prótesis de resina definitivas siempre con refuerzo metálico.

CARGA DIFERIDA

Gama de pilares Easy Link

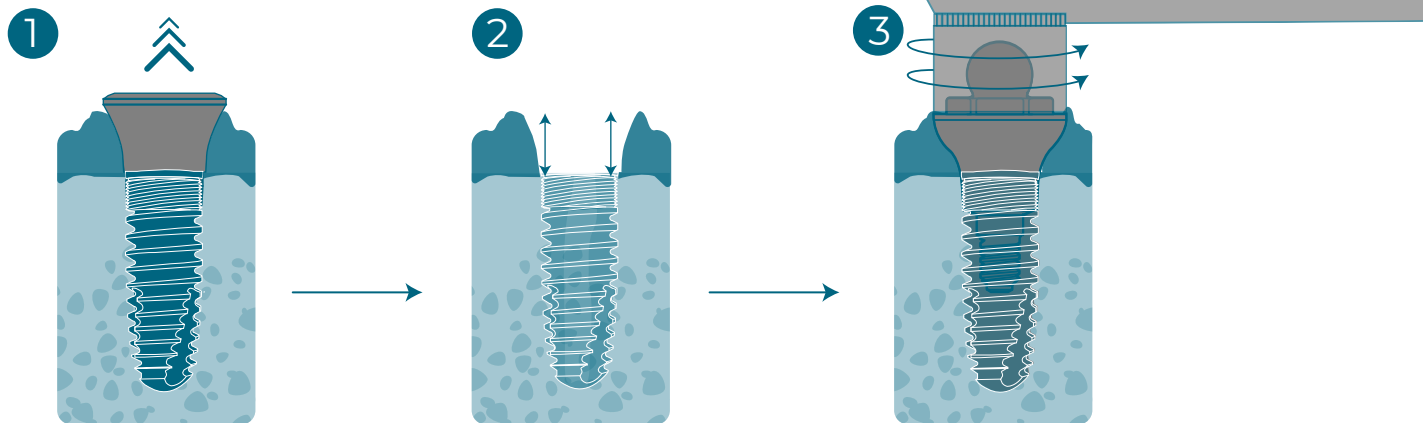

Se retiran los pilares de cicatrización o moldeador gingival quirúrgico.

Se mide la altura de la mucosa para elegir el pilar ideal de la gama de Easy Link. (La plataforma circular debe quedar paragingival o supragingival.)

Se atornilla el pilar Easy Link con destornillador o llave Easy Link a **22 Newton**.

4

IMPRESIÓN DIRECTA con cubeta convencional

LABORATORIO

A



Se coloca los transfer's en boca y procedemos a tomar la impresión preferiblemente silicona fluida-pesada, una vez fraguado el material de impresión retiramos la cubeta de boca arrastrando con ella los transfer's, una vez retirado de boca reposicionamos en los transfer's las réplicas de EASY LINK y procedemos al vaciado de impresión con escayola (preferentemente tipo III), obteniéndose el modelo maestro o de trabajo. Para realizar en el laboratorio protésico todos los procedimientos de la fabricación de la prótesis hasta su colocación definitivamente en boca.

B



Al finalizar una toma de impresión o prueba con el paciente, es necesario proteger la lengua colocando sobre los pilares el **protector liso de Peek**.

En caso de realizar la prótesis definitiva con el casquillo metálico, se puede realizar la toma de impresión con los pasos de este proceso B, trabajando directamente como a dientes naturales, de manera más sencilla.

Se colocan los protectores sobre los pilares Easy Link en la boca.

Tomamos la impresión preferiblemente con alginato quedando la huella de los protectores lisos de peek en el material de impresión y procedemos a trabajar en el laboratorio como una prótesis tradicional.

Incorporando los casquillos metálicos a la prótesis y rebasandolos en boca.

TOMA DE IMPRESIÓN

ADITAMENTOS PROTÉSICOS PARA ACABAR EL TRABAJO



Casquillos Metálicos.



Retenedor
Poca Dimensión vertical: CAD-CAM. (Solamente)



Casquillos Metálicos.
Dimensión vertical suficiente. (80% casos)

El resto de los pasos se realizará según prótesis convencionales



5 Prueba de estructura

Colocar sobre los pilares Easy Link los aditamentos protésicos seleccionados (casquillos metálicos, retención negra [ultraligero]).

Comprobar que la estructura se ajusta correctamente. Realizar un registro oclusal.

Retirar los aditamentos protésicos y volver a colocar los protectores lisos de peek o la prótesis provisional (en su caso) sobre los pilares Easy Link.


6 Colocación del trabajo definitivo

Colocar sobre los pilares Easy Link los aditamentos protésicos seleccionados (casquillos metálicos).

Comprobar que el trabajo se ajuste correctamente.

Finalmente, aplicar el cemento DEFINITIVO (en la cantidad adecuada) en los albergues de la prótesis y cementar o rebasar con resina dependiendo del material de la estructura sobre los casquillos metálicos rayados directamente en la boca.

Nota: En la técnica CAD-CAM la colocación se realiza presionando la prótesis definitiva sobre los pilares Easy Link directamente en la boca, puesto que los retenedores definitivos vienen ya incorporados en la prótesis. Estos retenedores intercambiables tienen distintos grados de retención (ver página 16).

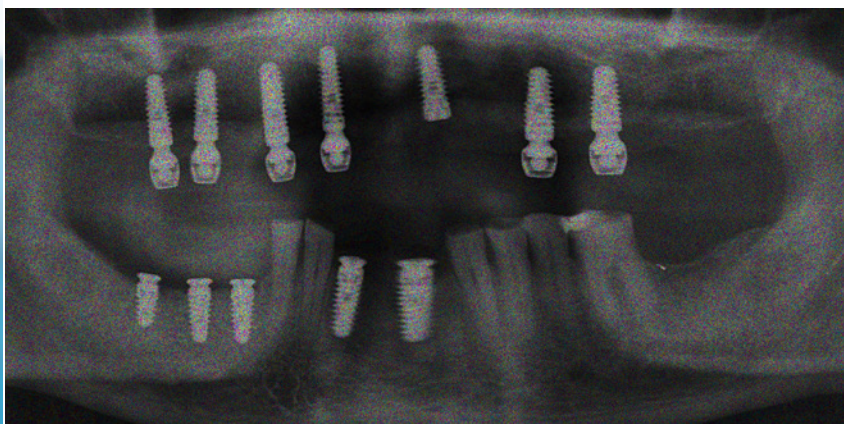


Procedimiento Easy Link paso a paso
Arcada superior e inferior mismo paciente



Esfera



Transfer

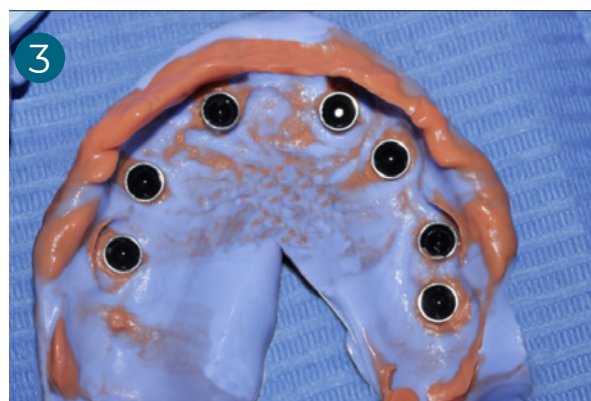

Toma de impresión directa con cubeta convencional



Prueba de diente montada en cerámica



Prótesis con 4 retenedores de prueba



Prótesis definitiva con 4 retenedores de prueba



*Colocación en boca
Prótesis terminada*



Soporte labial estético y funcional

Procedimiento Easy Link paso a paso
Arcada inferior y superior mismo paciente



Pilares para cementar




Esferas Easy Link en tramo edentulo




Prótesis definitiva con retenedor ultraligero de prueba



Prótesis definitiva ceramo-metalica

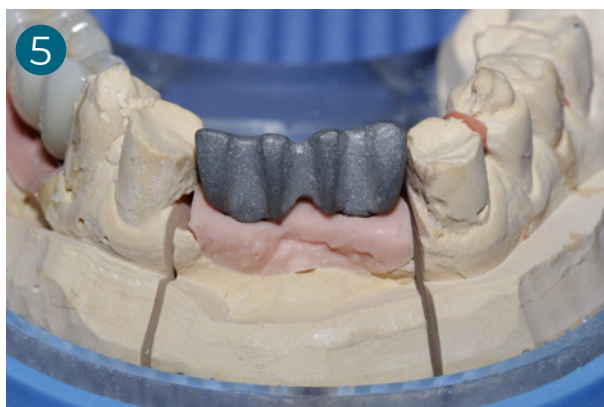

Estructura de prótesis cementada

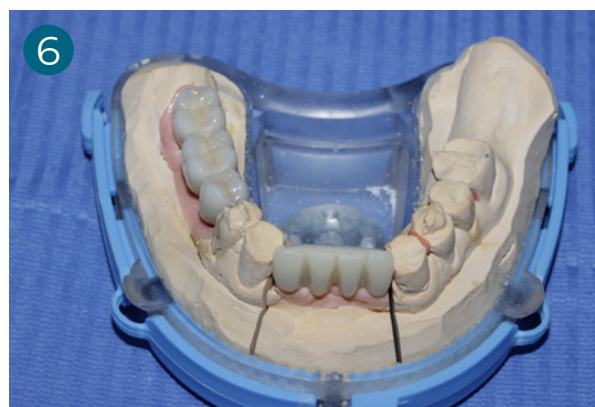

2 prótesis (Easy Link y prótesis cementada)



Prótesis cementada e incrustaciones en atriciones



Rehabilitación oral

- 1- Protesis arcada superior completa.
- 2- Protesis ceramo metálica.
- 3- Pilares cementados.

PILARES $\varnothing$ 6mm



Triplo

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL 1D
2,0mm (h)	PB EL 2D
3,0mm (h)	PB EL 3D
4,0mm(h)	PB EL 4D
5,0mm(h)	PB EL 5D



Triplo Perio

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL IKT D
3,0mm (h)	PB EL IKT 3D



All Spiral

CE 0051

REF.

3,0mm (h)	PB EL IST D
-----------	-------------



Hexagon 4.1

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL IHT D
2,0mm (h)	PB EL IHT 2D
3,0mm (h)	PB EL IHT 3D
4,0mm(h)	PB EL IHT 4D
5,0mm(h)	PB EL IHT 5D



Winner 3.5

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL IHI 35
2,0mm (h)	PB EL IHI 35 2
3,0mm (h)	PB EL IHI 35 3
4,0mm(h)	PB EL IHI 35 4
5,0mm(h)	PB EL IHI 35 5



Winner 4.5

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL IHI 45 1
2,0mm (h)	PB EL IHI 45 2
3,0mm (h)	PB EL IHI 45 3
4,0mm(h)	PB EL IHI 45 4
5,0mm(h)	PB EL IHI 45 5

Llave colocación: **LEL T**

PILARES $\varnothing$ 4,5mm



Triplo

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL45 1D
2,0mm (h)	PB EL45 2D
3,0mm (h)	PB EL45 3D
4,0mm(h)	PB EL45 4D
5,0mm(h)	PB EL45 5D



Triplo Narrow

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL45 35 1D
2,0mm (h)	PB EL45 35 2D
3,0mm (h)	PB EL45 35 3D
4,0mm(h)	PB EL45 35 4D
5,0mm(h)	PB EL45 35 5D



Hexagon

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL45 IHT 1D
2,0mm (h)	PB EL45 IHT 2D
3,0mm (h)	PB EL45 IHT 3D
4,0mm(h)	PB EL45 IHT 4D
5,0mm(h)	PB EL45 IHT 5D



Winner 3.5

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL45 IHI35
2,0mm (h)	PB EL45 IHI35 2
3,0mm (h)	PB EL45 IHI35 3
4,0mm(h)	PB EL45 IHI35 4
5,0mm(h)	PB EL45 IHI35 5



Winner 4.5

CE 0051

REF.

1,0mm (h)	PB EL45 IHI45 1
2,0mm (h)	PB EL45 IHI45 2
3,0mm (h)	PB EL45 IHI45 3
4,0mm(h)	PB EL45 IHI45 4
5,0mm(h)	PB EL45 IHI45 5

Llave colocación: **DH 17/DH 23**

PILARES ANGULADOS



Triplero 15°

CE 0051



REF.

PB EL A15 3
PB EL A15 4
PB EL A15 5
PB EL A15B 3
PB EL A15B 4
PB EL A15B 5



Triplero 25°



REF.

PB EL A25 3
PB EL A25 4*
PB EL A25B 3
PB EL A25B 4



Hexagon 15°

CE 0051



REF.

PB EL A15 IHT 4
PB EL A15 IHT 5*



Hexagon 25°



REF.

PB EL A25 IHT 4



Winner 15°

CE 0051



REF.

PB EL A15 IHI45 3
PB EL A15 IHI45 4
PB EL A15 IHI45 5
PB EL A15B IHI45 3
PB EL A15B IHI45 4
PB EL A15B IHI45 5



Winner 25°



REF.

PB EL A25B IHI45 3
PB EL A25B IHI45 4*

Llave colocación: LEL T/DH 17/DH H23

Todos incluyen tornillo occlusal

* Preguntar existencias

PROTECTORES



Protector liso de Peek Easy Link

CE 0051

REF.

Ø 6,0mm MG L EL
Ø 4,5mm MG L EL 45

INSTRUMENTAL EASY LINK



Llave de inserción Easy Link para plataforma clásica Ø6,0mm*

CE

REF.

LEL T



Destornillador hexagonal 1,25mm Easy Link plataforma estrecha Ø4,5mm*

CE

REF.

corto DH 17

largo DH 23



Destornillador torx*

CE

REF.

corto DT 17

largo DT 23

RETENEDORES INTERCAMBIABLES

FUERTE



Retenedores Easy Link

CE 0051

REF.

MEDIO



Ø 4,5mm

LIGERO



FUERTE

RR EL45 F

MEDIO

RR EL45 M

LIGERO

RR EL45 L

ULTRALIGERO



ULTRALIGERO

RR EL45 N

Ø 6,0mm

FUERTE



FUERTE

RR EL F

MEDIO



MEDIO

RR EL M

LIGERO



LIGERO

RR EL L

ULTRALIGERO



ULTRALIGERO

Llave colocación: DH 17/DH 23

Retenedores con conexión Torx de Easy Link

FUERTE



CE 0051

REF.

Ø 6,0mm

MEDIO



FUERTE

RR ELT F

MEDIO

RR ELT M

LIGERO

RR ELT L

LIGERO




ULTRALIGERO

RR ELT N





ULTRALIGERO



Llave colocación: DH 17/DH 23

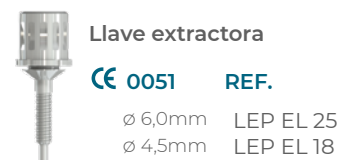

LABORATORIO

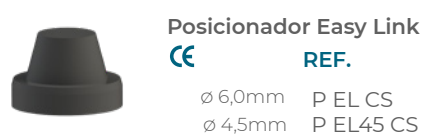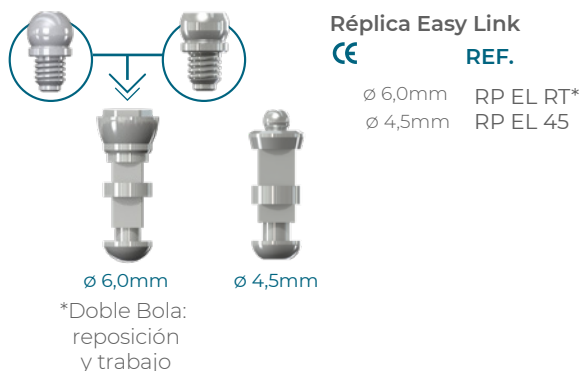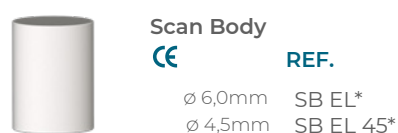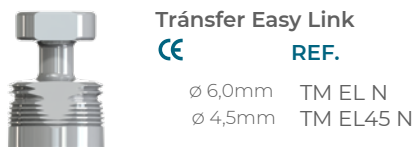

(Existen librerías CAD-CAM. Y escaneado directamente al Easy Link)

PACK EASY LINK

Plataforma clásica ø 6,0mm



Retenedores intercambiables Easy Link



Protector liso de Peek Easy Link



Casquillo metálico Easy Link




Plataforma estrecha ø 4,5mm



Retenedores intercambiables Easy Link



Protector liso de Peek Easy Link

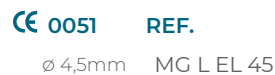

Casquillo metálico Easy Link



LA SOLUCIÓN PARA
PRÓTESIS
FIJAS Y REMOVIBLES



TLF. **96 530 64 64**
C/ Irlanda, 2
Almoradí (Alicante)
España
info@eckermann.es
www.eckermann.es

